

HIFU

ハイフとは

超音波を一点に集めて熱を発生させ、
コラーゲンを収縮するといったマシンです。
コラーゲンが再生され、増殖するのでリフトアップや
お肌のハリ、化粧ノリが良くなるといった効果が期待できます。

ハイフのメリット

- ・ リフトアップ
- ・ セルライトを減らす
- ・ お肌のキメが整う
- ・ むくみが取れる
- ・ 美肌効果もあり、お化粧ノリが良くなる
- ・ ほうれい線、たるみにも◎

最新5Dハイフを導入しています♥

従来の熱による痛みを伴うお肌にダメージの大きいハイフではなく、超音波によってコラーゲンを活性させることで美肌やリフトアップに効果を出します◎

当店のハイフはお肌にダメージの少ない痛くないハイフですので、施術箇所がポカポカ感じる程度です。

お客様のお肌に優しいハイフを提供致します😊💕



HIFU

STEP1 機械の後ろにある黒色の電源ボタンを入れます。



STEP2 機械の設定をします。顔の照射の場合…6000ショット

SHOTSを2000に設定します。

3つのカートリッジがあり、2000にセットしておく
と、2000ショットの照射が終わったら、自動的に
機械が止まってくれます。

1回目の照射が止まったら次のカートリッジと交換
して計3つ照射します。



MODEを3～5Hzに設定します。

顔の施術の際は、3～5Hzがベストの数値になります。初めは3から始めて
熱さやお痛みがなければご自身で5Hzまで上げてください。

※毎回、施術の前にスタッフが確認致しますので、ご質問や
ご相談等ございましたらお気軽におっしゃってください◎

ボディの場合は
6～8Hzです🌻

POWERは95～100%に設定します。

初めての方は、90～95%で設定して頂き、
慣れてきたら100%まで上げてください。

※必ず設定基準値をお守りください。

設定を変えると効果が薄れてしまいます。

※全て自己責任になってしまうのでご注意ください。

STEP3 STARTを押したらスタンバイOKです。



HIFU

STEP4 カートリッジをハンドルに差し込みます。

顔①のカートリッジを取り出して、ハンドルに差し込みます。
カチッと音が鳴ればOKです☺



STEP5 施術する箇所にジェルを塗ります。


※ジェルは多すぎると効果が薄れる場合があるので
少なめで肌に馴染むくらいがベストです😌

ジェルの使い方

ジェル①伸びやすく、乾きにくいので何回も塗る必要がないです。初心者の方におすすめです📖

ジェル②サラサラしていてすぐ乾くので、拭く必要がなく
肌に馴染んでくれます。

STEP6 施術の前にアルコールで接地面を消毒します。

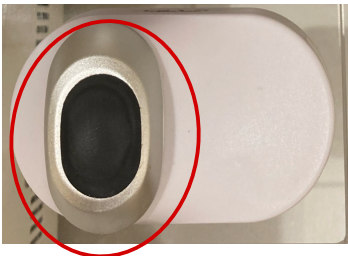

接地面(黒い部分)を

アルコールで消毒します。

HIFU

STEP7 ハンドルのバンドを腕に通します。

落下防止のため、必ずつけてください。

※万が一、落下して破損してしまった場合は、損害賠償が発生しますのでご注意ください。

STEP8 ハンドルの白い丸いボタンを押すと照射がスタートします。



1回ボタンを押すと連続で照射が始まります。

止めたい場合は、もう一度ボタンを押すと止まります。

ストップする際は、必ずお肌の上で止めてください。

連続照射されているので、お肌から離してしまうと無駄打ちになってしまいます。

初めての方は

2000ショットを1000発ずつ左右分けて照射すると綺麗な仕上がりになります◎

慣れてきたら

気になっている箇所に重点的に当てても良し◎

頬やあごなど肉が多いところに当てるのも良し◎



移動する際も必ずお肌に接地面を密着させながら移動させてください！



施術が終わったら、機械の電源を切ってください。